

PRINT SPECIFICATIONS

Project: VERDERA Instructions

File format:

AI - editable source file

PDF/X-1a - print-ready file

Color Mode: CMYK

Size and Bleed:

Bleed: 3 mm (all sides)

Safety Margins: 5 mm inside trim

Fonts:

Montserrat - Regular, **Semibold**, **Bold**



VERDERA

**Инструкция по эксплуатации
симулятора губ Verdera**



Видео-инструкция

Внимание!

Данный товар является демонстрационным тренажёром.

Компоненты тренажёра не являются самостоятельным приспособлением для каких-либо медицинских манипуляций, в том числе для контурной пластики и татуажа.

Обращаем внимание, что жидкость, используемая в качестве филлера, является демонстрационным вариантом и **НЕ ПОДХОДИТ** для проведения инъекций вне симуляционных действий.

Инструкция по эксплуатации тренажёра

1. Подготовка

- Подготовьте рабочее место. Тренажёр должен находиться на твёрдой поверхности и не скользить. Убедитесь, что всё необходимое для манипуляции имеется на рабочем столе (рис. 1)



рис. 1

- Наденьте губы на пластиковую основу (зубную часть) (рис. 2, 3).



рис. 2



рис. 3

- Сделайте серию фотографий в общем и макро-режиме, чтобы по окончании процедуры оценить изменения.

В связи с отсутствием других анатомических ориентиров (носа, скул, подбородка) результат заметить сложнее, именно для этого и нужны фотографии «до» и «после» (рис. 4).

Второй вариант оценки результата – выполнить сначала коррекцию только с одной стороны (на одной половине) и сравнить с противоположной.

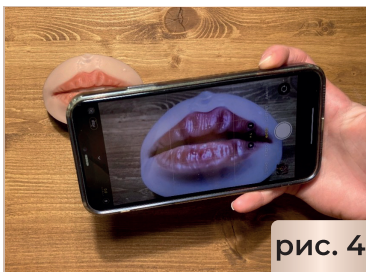


рис. 4


Важно! Чтобы симулятор отработал на все 100 %, относиться к нему нужно как к натуральным тканям — бережно и осторожно. Наши модельеры ежедневно трудятся, чтобы придать симуляторам ещё большей реалистичности.

2. Подготовка филлера и шприца

- Вскройте ёмкость с филлером и наберите необходимое количество филлера в шприц (**рис. 5**).



- Необходимо очистить кончик шприца от остатков филлера и насадить иглу на шприц (**рис. 6, 7**).

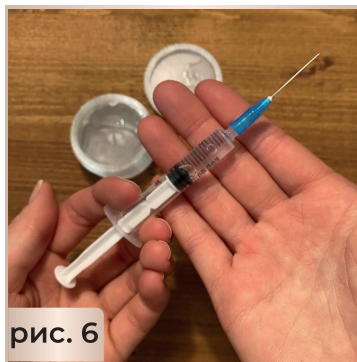

- Наденьте пластиковый чехол (имитация карпульного шприца) на шприц с надетой иглой (**рис. 8**).



рис. 8

3. Проведение процедуры

- Приступайте к отработываемым техникам (**рис. 9**).



рис. 9

- По окончании процедуры сделайте фотографии и сравните результат **«до / после»**.

4. Очистка и повторное использование

- Тренажер многоразовый. Чтобы удалить аналог филлера из тренажера, нужно аккуратно надавить на место инъекции (**рис. 10**), чтобы он вышел, затем очистить поверхность салфеткой и можно снова приступать к отработке навыка (**рис. 11**).



- Рассчитана 1 пара губ на 20+ полноценных процедур (все зависит от частоты инъекций во время процедур и бережно ли вы относитесь).

Подготовка и работа с датчиком губной артерии

- Наденьте силиконовый эстетический компонент на пластиковую основу тренажера правильно (зубы должны стоять корректно).
- Подключите магнитный коннектор.
- Подсоедините кабель питания к разъёму в пластиковой основе и подключите устройство к сети.
- После включения прозвучат три коротких сигнала — это означает, что тренажёр готов к работе.

Важные условия эксплуатации:

- Работайте без перчаток — это необходимо для корректного срабатывания датчика.
- Обязательно используйте специальную насадку и иглу, входящие в комплект — только при их применении датчик функционирует корректно.
- Для стабильной работы рекомендуется подключение к постоянному источнику питания:
 - напрямую к розетке, или
 - через ноутбук, подключённый к сети.

Обратная связь

Будем благодарны за ваш отзыв о нашем продукте, который можно оставить в удобном вам мессенджере по QR-коду. Наша миссия — сделать обучение безопасным, доступным и качественным. Мы открыты к изменениям и с большим вниманием относимся к вашей обратной связи.





VERDERA

Стираем вероятность ошибки